

GRIPPE A ET B – TEST RAPIDE

Se désinfecter préalablement les mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique et mettre des gants à usage unique.

Utiliser l'écouvillon spécifique du kit.

Réalisation de l'écouvillonnage naso pharyngé :

- Patient assis, dos contre le dossier du siège, inclinaison de la tête en arrière.
- Dégager l'orifice narinaire.
- Insérer l'écouvillon dans une narine parallèlement au palais, et pousser doucement aussi loin que possible.
- Faire une ou 2 rotations puis le retirer lentement.
- Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon.

Décharger l'écouvillon dans le tube de diluant du kit.

Jeter l'écouvillon.

Identifier le tube de diluant.