

TRANSPORT DES PRELEVEMENTS

- **CONDITIONS DE TRANSPORT**

Réunir dans la boîte de prélèvement les échantillons sanguins, la prescription et la fiche de transmission de prélèvement complétée.

Pour les prélèvements bactériologiques, mettre l'échantillon dans le sachet hermétiquement fermé, et insérer dans la poche extérieure la prescription et la fiche de transmission de prélèvement.

Acheminer rapidement les prélèvements.

Les conditions de transport sont essentielles à la qualité des résultats. Nous vous demandons de prendre toutes les précautions pour ne pas exposer les prélèvements à des températures trop chaudes ou trop froides (ne pas exposer les coffrets près de la bouche de chauffage ou climatisation de votre véhicule, sur le tableau de bord, etc...). De même, les boîtes contenant des tubes vides ne doivent pas être soumises à des températures extrêmes.

Transporter de préférence les tubes verticalement en évitant les secousses.

- **DELAI D'ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE**

Le délai d'acheminement au laboratoire doit respecter les conditions décrites dans le guide des examens.