



- Un tube citrate doit toujours être correctement rempli :
  - la zone dépolie correspond à 90% du remplissage.
  - Un remplissage à 80% est toléré.

Attention, les limites de remplissage sont différentes selon le fournisseur du tube :

### Tubes BD :

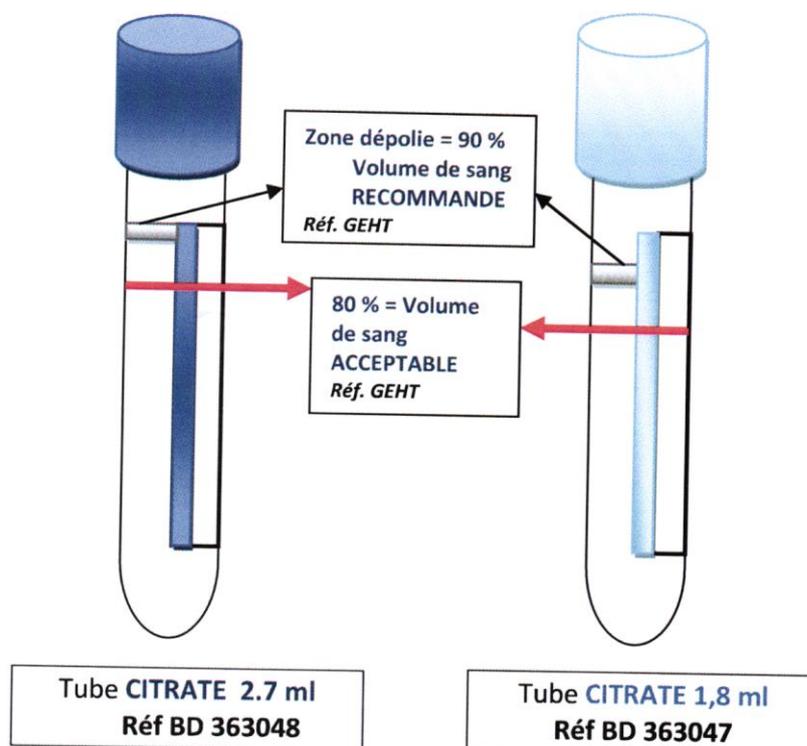

## Tubes CTAD Greiner 2 mL ref 474065

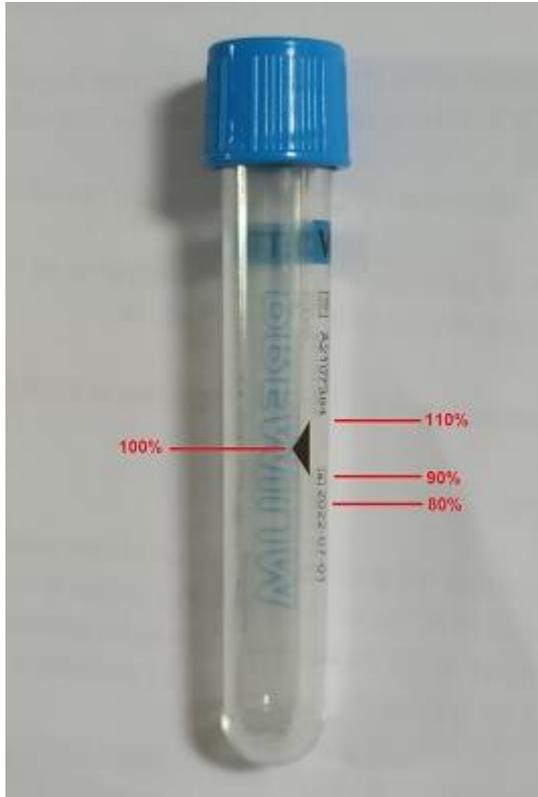

- Ne jamais mélanger 2 tubes citrate mal remplis pour en faire 1 bien rempli → cela aboutit à une dilution du sang et à des résultats faux
- Ne jamais transvaser un tube d'une autre couleur dans un tube citrate → cela aboutit à des résultats faux