



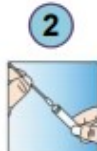



PRELEVEMENT URETRAL

Un **déla** minimum de **1 heure** doit séparer le prélèvement de la dernière miction.

Se désinfecter préalablement les mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique et mettre des gants à usage unique.

Avant miction :

- Prélever *1 seul écouvillon Transwab fin* (bouchon **orange**) pour la recherche bactériologique standard :
 - si écoulement purulent prélever directement la goutte de pus,
 - sinon introduire l'écouvillon dans l'urètre en effectuant 3 à 4 rotations, afin de ramener le maximum de cellules.
 - décharger et casser l'écouvillon dans le milieu de transport selon le schéma ci-dessous.

<p>Σ-Transwab®</p>  <p>Transport & Conservation des Bactéries aérobies, anaérobies & fastidieuses</p>	<p>MODE OPERATOIRE</p> <ol style="list-style-type: none"><p>Retirer l'écouvillon et le tube du sachet</p><p>Après avoir effectué le prélèvement, décharger l'écouvillon dans le milieu de transport</p><p>Casser l'écouvillon dans le tube, au niveau de la partie sécable</p><p>Bien refermer le tube, en vissant le bouchon au maximum</p><p>Lorsque le flacon est ouvert à nouveau, l'écouvillon est capté au niveau du bouchon</p> <p>👉 Bien laisser l'écouvillon dans le tube après l'avoir cassé NB : 1 seul écouvillon est suffisant pour Gram et culture.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- La recherche de mycoplasme (prescription explicite) ne nécessite pas d'écouvillon supplémentaire.
- La recherche de *Chlamydia Trachomatis* et/ou de *Neisseria Gonorrhoeae* par amplification génique n'est pas réalisée sur prélèvement urétral mais sur **1^{er} jet d'urine** (voir fiche prélèvement urinaire).