

Prélèvement des écouvillons vaginaux pour les tests BD MAX™ CT/GC/TV et CT/GC

Instructions pour l'auto-prélèvement des écouvillons vaginaux à partir du kit de prélèvement BD MAX™

Lire attentivement les instructions avant de réaliser le prélèvement. Ne pas hésiter à contacter le médecin ou l'infirmière pour toute question.

1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon. Les rincer et les sécher.
2. Il est important de conserver un équilibre confortable pendant le prélèvement.
3. [rouvrir le capuchon pour casser le sceau (figure 1). Retirer l'écouvillon stérile de son tube de transport. Ne pas toucher l'embout et ne pas poser l'écouvillon. Si vous touchez l'embout de l'écouvillon, si vous le faites tomber ou si vous le posez, jetez cet écouvillon et demandez-en un neuf.
4. Tenir d'une main l'écouvillon par son bouchon blanc, de sorte à orienter l'embout de l'écouvillon vers soi.
5. De l'autre main, écarter doucement les lèvres du vagin. Introduire l'embout de l'écouvillon dans l'ouverture vaginale. Pointer l'embout vers le bas du dos et relâcher les muscles (figure 2).
6. Faire doucement glisser l'écouvillon dans le vagin sur 5 cm au plus (figure 3). Si l'écouvillon ne glisse pas facilement, le faire tourner doucement en l'enfonçant. Si cela reste difficile, ne pas essayer de continuer. S'assurer que l'écouvillon touche les parois du vagin de sorte que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
7. Faire tourner l'écouvillon pendant 10 à 15 secondes (figure 4).
8. Ressortir l'écouvillon sans toucher la peau. Replacer l'écouvillon dans son tube de transport et fermer bien avec le bouchon (figure 5).
9. Après le prélèvement, se laver les mains avec de l'eau et du savon, les rincer et les sécher.
10. Remettre l'écouvillon dans son tube à l'infirmière ou au médecin.



BD Diagnostics
11 rue Aristide Bergès
38800 Le Pont de Claix
France
www.bd.com/fr/fr

BD MAX™ - automate et réactif pour la réalisation de tests moléculaires (extraction, amplification et détection en temps réel).
Auto dilution selon DIN 9879/CE, MD non-Avance II, fabricant : BD Balthore, USA.
Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.
Certains tests moléculaires sont pris en charge par l'assurance maladie.

BD, le logo BD et toutes les autres marques commerciales sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. ©2015
XDR5282-15

